



medi

Knöchelbandage



Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi.
Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per
l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning.
Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по
использованию. Giyinme kılavuzu. Instrukcja zakładania.
Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató. Uputstvo za upotrebu.
Інструкція з використання. Navodila za uporabo.

medi. I feel better.



1



2



3



4

Ankle support

Назначение

Компрессионный бандаж Ankle support используют только для лечения травм и заболеваний голеностопного сустава. При наличии заболеваний и повреждений кожи в области наложения бандажа изделие не должно непосредственно контактировать с проблемными участками.

Показания

- Повреждения и ушибы связок голеностопного сустава
- Отек мягких тканей в области голеностопного сустава, в том числе с выпотом в полость сустава
- Артрит голеностопного сустава как симптом остеоартроза или ревматизма

Противопоказания

Артериальная недостаточность нижних конечностей, Флебиты вен нижних конечностей, Тромбоз вен нижних конечностей, Трофические язвы нижних конечностей. При варикозном расширении вен нижних конечностей бандаж следует использовать вместе с компрессионным трикотажем как минимум до уровня коленных суставов.

Рекомендации по применению

Возьмитесь за верхний край изделия (отмеченный ярлыком) и натяните его на ступню и область голеностопного сустава так, чтобы пятка вошла в предназначенное для нее углубление. Равномерно расправьте бандаж.

Рекомендации по уходу

Стирайте изделие нейтральным моющим средством вручную или в стиральной машине в режиме «Деликатная стирка» при температуре воды 30°. Тщательно прополощите, так как остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствуют ускоренному износу материала. Сушите в расправленном виде вдали от нагревательных приборов.

- Не отбеливать.
- Не отжимать.
- Не сушить в сушильной машине.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

полиамид, эластан

Гарантия

Согласно законодательству, действующему на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!